

Gummiramper/kiler til dørtrin (varenr. 306040-306602)

Montage- og brugervejledning

Montage:

Gummiramperne leveres enten med eller uden limfolie. Limfolie er velegnet til et underlag af fliser eller et nyere trægulv. Ved gulvtæpper og ældre sarte trægulve skal ramper uden limfolie benyttes. De kan fastgøres stabilt til underlaget med dobbeltklæbende tape. Mobilex A/S tilbyder rensesvæske for limrester (varenr. 306905). Mobilex A/S tager ikke ansvar for beskadigede gulve efter montage af gummiramper med limfolie.

Gummiramperne leveres i 17 forskellige højder (fra 4 og op til 60 mm) og 3 forskellige bredder (700 mm, 900 mm og 1000 mm). Hvis gummiramperne skal tilpasses i bredden kan dette nemt gøres med enten en almindelig lommekniv eller et savblad fra Mobilex A/S (varenr. 306904).

Ramperne er lavet af gummi og har en skridsikker køreflade.

Max. belastning

Mobilex gummiramper er CE-testet til at håndtere en belastning på op til 300 kg.

Rengøring:

Gummiramperne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Tåler maskinvask efter Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i henh. hjemmepleje og i plejeboliger.

Garanti:

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.