

# Mobilex "Alligator" TR og LR Ramper

## Montage- og brugervejledning



**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
www.mobilex.dk

## 1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Ved spørgsmål bedes De henvende Dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Denmark

Phone: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhed - Generelle henvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Sørg for, at denne brugervejledning bliver læst af alle personer der anvender rampen. Skader, der skyldes at brugervejledningen ikke er fulgt, vil ikke blive erstattet.
- Rampen må maksimalt anvendes ved stigninger på:  
**LR/TR-150: 30 cm**  
**LR/TR-210: 40 cm**  
**TR-300: 50 cm**
- Benyt kun rampen til det formål, den er bestemt til.
- Anvend kun ramper, der er i teknisk god tilstand.
- Undlad at lave konstruktive ændringer på rampen, medmindre producenten skriftligt har godkendt dette.
- Når rampen anvendes skal brugeren være opmærksom på ikke at klemme fingre eller andet.
- Rampen må kun anvendes på et stabilt grundlag.

## 3. Formålsbeskrivelse

### Produkt beskrivelse


Mobilex Ramper er transportable ramper beregnet til at forflytte patienter i kørestole. De muliggør passage af højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper. (F.ex. trapper). Mobilex Ramperne gør det dermed muligt for patienter, der pga. en invaliditet sidder i kørestol, at entrere eller forlade en bygning, og opfylder derved et grundlæggende behov. De kan anvendes såvel indenfor som uden-dørs.

CH-Ramper leveres monteret i kartoner. Indholdet består af:

- ✓ 2 Ramper, højre og venstre side
- ✓ 1 Brugsanvisning

### Indikation

Mobilex Ramper finder anvendelse ved patienter, der pga. invaliditet sidder i kørestol. De gør det muligt for patienterne at overvinde højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper.

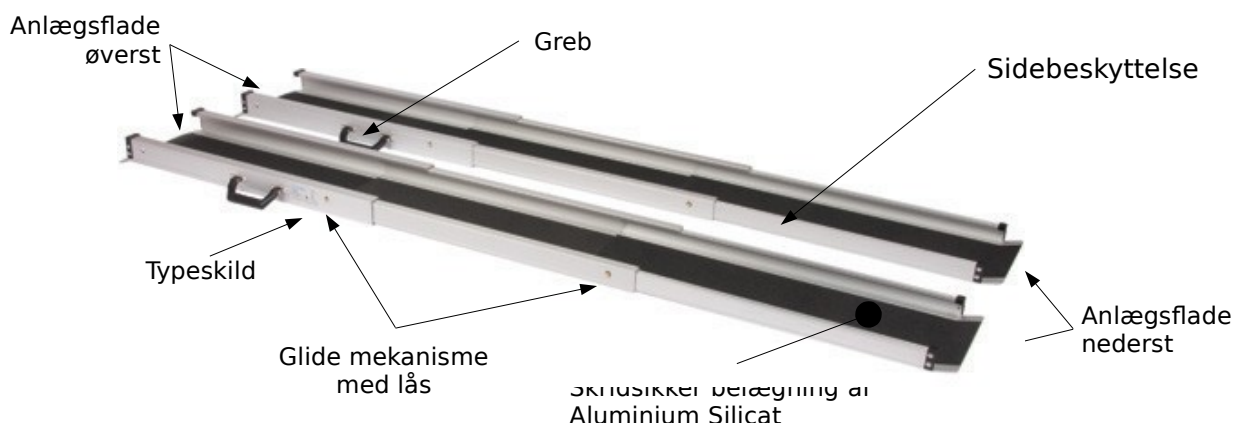

### Opsætning & funktionsbeskrivelse

- Ramperne skal låses i åben position med klik-låsen
- Ramperne skal altid placeres parallelt
- Ramperne skal placeres så den skridsikre overflade vender opad
- Ramperne skal placeres på en stabilt underlag.
- Check at rampen er stabil før den benyttes

### Transportbeskrivelse

Alligator rampe type TR kan skubbes sammen og låses for transport. Hav altid rampen låst under transport.

## 4. Tekniske data

TR/LR ramper	TR-150	TR-210	TR-300	LR-150	LR-210
Længde	2 x 150 cm	2 x 210 cm	2 x 300 cm	2 x 150 cm	2 x 210 cm
Bredde	2 x 26 cm	2 x 26 cm	2 x 26 cm	2 x 16 cm	2 x 16 cm
Køreflade bredde	2 x 19 cm	2 x 19 cm	2 x 19 cm	2 x 11 cm	2 x 11 cm
Sidebeskyttelse	5 cm	5 cm	5 cm	3 cm	3 cm
Max. Stigning / højdeforskel	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 60 cm	12° / 30 cm	12° / 40 cm
Total vægt	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg	2 x 3 kg	2 x 4 kg
Max. belastning	225 kg	225 kg	225 kg	180 kg	180 kg
Bemærkning	Anvendes parvist	Anvendes parvist	Anvendes parvist	Anvendes parvist	Anvendes parvist

### Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på ydersiden af rampen



Billede af de typeskiltet (ikke original)

## 5. Vedligeholdelse & Rengøring

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

- Lettere snavs og støv kan fjernes med en fugtig klud.
- Tungere former for snavs kan fjernes med et ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.
- Du kan også bruge en haveslange til rengøring af rampen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

## 6. De mest almindelige problemer og løsninger

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Rampen åbner sig ikke	Klik-låsen er ikke trykket ind	Tryk klik-låsen ind og Unlock springs and open the ramp
Rampen er ikke stabil	Underlaget under rampen er ikke jævnt.	Tjek rampens position og sat den på en jævn overflade
Rampen er ikke stabil	Rampen er vendt med undersiden opad	Tjek om mærkat A er øverst ved den forhindring der skal forceres.

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S , Grønlandsvej 5 , 8660 Skanderborg, erklærer hermed, at produktet:

### **Alligator Rampe - TR-LR serie**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter**  
Del I fra 14 Juni 1993

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 03.02.2005

  
.....  
Underskrift