

Valg af hjul type.


Der findes flere typer af forhjul. I tabellen nedenfor har vi forsøgt og vise fordele og ulemper ved de forskellige hjul typer, så du får netop det hjul, der passer til din behov.

Hjultype	Komfort	Rullemodstand	Risiko for Punktering
	Middel	Lav	Nej
Gummibanehjul			
	Middel	Middel	Nej
Polyurethanhjul			
	Høj	Middel	Ja
Lufthjul			
	Høj	Middel	Nej
Flexelhjul			

Valg af hjul størrelse

Vi kan levere forhjul til din kørestol i flere størrelser. Et lille hjul er let at dreje, men det kan ikke køre over så stor en forhindring. Hvorimod et større hjul er besværligere at dreje, men det kører lettere over forhindringer.

Det er vigtigt, at hvis du ændrer din hjulstørrelse, at du ikke ændrer forgafleens vinkel. Dette gøres ved at montere et andet hul i forgaflen som vist på skitsen nedenfor.

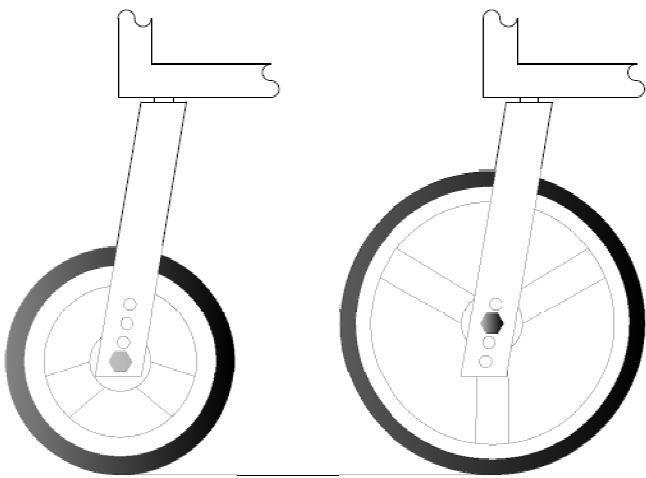


Valg af banebredde/type

Af hjul typerne findes der flere bane bredder

	
Den smalle bane har lav rullemodstand og er let at dreje. Den har dog lettere ved at grave sig ned i løst underlag. F.eks. grus eller sand	Den brede bane har en lidt højere rullemodstand, og har svære ved at dreje. Den er bedre i løst underlag.

Valg af navbredde


Kørestole kan være forsynet med mange forskellige bredder af forgafler . For at de leverede hjul passer til din kørestol, leverer vi de nødvendige afstandsbøsninger bøsninger uden ekstra omkostninger. Det er derfor vigtig, at du måler bredden på forgaflen før bestilling. På skitsen til ses, hvordan man måler navbredden.

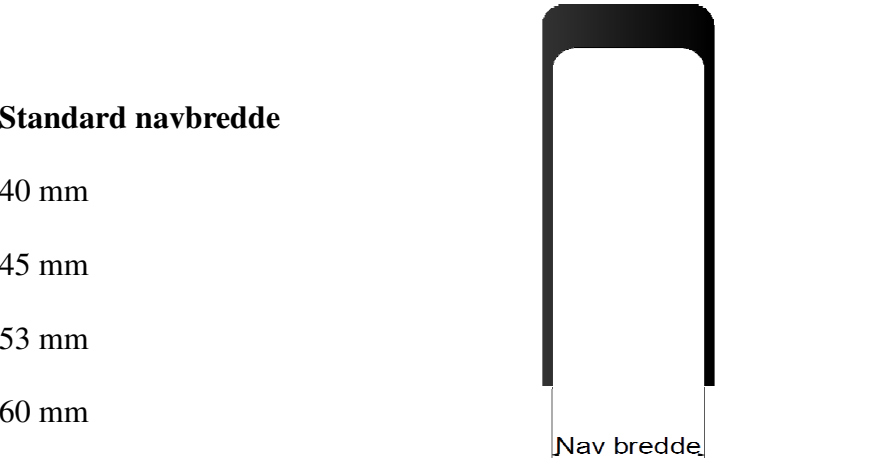


Andre navbredder kan leveres efter forespørgsel.

Valg af akseltykkelse

Hjulene leveres som standard med bøsninger for 8 mm bolt. Enkelte producenter monterer din hjul med 6 mm bolt . Hvis dette er tilfældet med din kørestol bedes det oplyst ved bestilling.

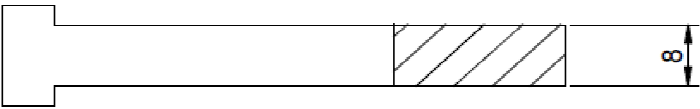

Standard aksel/skrue tykkelse

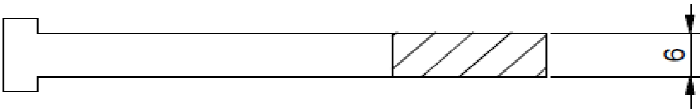

Særlig aksel/skrue tykkelse . Bedes oplyst ved bestilling